

**HINWEISE ZUM VERSAND VON BLUTPROBEN**  
**HIV-1 Serokonverterstudie**  
**des Robert Koch-Instituts Berlin**

➤ **Versandmaterial und Verpackungsvorschriften für „Diagnostische Proben“**

Das **Versandmaterial** wird kostenlos vom RKI zur Verfügung gestellt. Sie können

- Versandröhrchen (mit aufsaugendem Vlies)
- Verpackungskartons (T-Box)
- EDTA-Monovetten (Fa. Sarstedt, 10 ml)

beim HIV-Studienlabor anfordern (Sabrina Neumann, **Tel.: 030-18754-2243**, **E-Mail-Adresse:** [Serokonverter.HIV@rki.de](mailto:Serokonverter.HIV@rki.de)).

Bei der Blutprobe des Patienten handelt es sich um eine Sendung, die nach den Regelungen der ADR und IATA-DRG, die seit 1.1.2005 in Kraft ist, zu der gefahrgutrechtlichen Kategorie B (UN 3373) gehört. Die Versandunternehmen fordern, dass Sendungen nach der Verpackungsvorschrift Pi650 zu verpacken sind, hierbei muss das Packstück mindestens eine Grundfläche von 10x10 cm haben und muss markiert sein mit der entsprechenden Kennzeichnung **UN3373** und der Aufschrift „**Biologischer Stoff, Kategorie B**“ bzw. „**Biological Substance, Category B**“.

Das Versandstück muss folgendermaßen aufgebaut sein:

- Probengefäß (z.B. Blutröhrchen)
- Wasserdichtes, bruchsicheres Schutzgefäß - üblicherweise handelt es sich hierbei um ein Kunststoffgefäß mit Schraubdeckel. Bei flüssigen Proben ist zwischen beiden Gefäßen saugfähiges Material anzuordnen.
- Außenverpackung
- Die Probenröhrchen und das Schutzgefäß müssen durch geeignete Polstermittel (z.B. Polyesterfolie) in eine Außenverpackung aus stabiler Pappe (oder gepolsterter Briefumschlag) verpackt werden. Am geeignetsten ist eine Verpackung im Karton, wie sie z.B. von der Firma Sarstedt als T-Box angeboten wird.
- Beschriftung: „Diagnostische Probe UN3373“



## ➤ Probenmaterial

- **Mindestens 20 ml EDTA-Blut** zum Basis- und Follow Up-Bericht
- Lagerung der Probe in der Praxis bei **Raumtemperatur**
- **Versand** muss möglichst am Tag der Blutabnahme, aber wenigstens **innerhalb von 24 h** organisiert werden

## ➤ Versandkosten und Versandbeauftragung

- Das HIV-Studienlabor beauftragt nach Rücksprache das Transportunternehmen ExBo mit dem Probentransport. Die Versandkosten hierfür werden vom RKI übernommen.
- Für die **Versandbeauftragung** bitte das HIV-Studienlabor kontaktieren: Sabrina Neumann, **Tel. 030-18754-2243, Serokonverter.HIV@rki.de**
- Versandaufträge **innerhalb Berlins** werden **Montag bis Freitag** in der Zeit von **9 bis 15 Uhr** entgegen genommen
- Versandaufträge **innerhalb Deutschlands** werden **Montag bis Donnerstag** in der Zeit von **9 bis 15 Uhr** entgegen genommen
- Adresse:  
Robert Koch-Institut  
FG18 - HIV und andere Retroviren  
HIV-Studienlabor  
Nordufer 20  
13353 Berlin

## ➤ Präanalytikhandbuch

Bitte beachten Sie auch das Präanalytikhandbuch des HIV-Studienlabors sowie den Untersuchungsanforderungsschein, zu finden unter [www.rki.de/hiv-studienlabor](http://www.rki.de/hiv-studienlabor).